


Bioline BZO Card


คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดเบนโซไดอะซีปีนส์ ในปัสสาวะด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive binding immunoassay)
- สามารถตรวจพบเบนโซไดอะซีปีนส์ และเมตาบอไลต์ได้ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 40 ตัวอย่าง


วิธีการทดสอบ

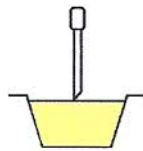

ตัวอย่างปัสสาวะ

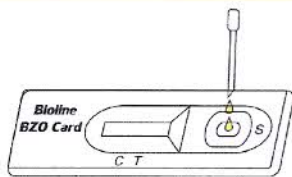


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยดลงในหลุม "S"

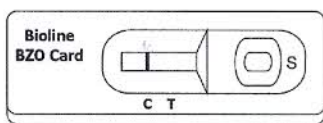


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที



แปลผลการทดสอบ

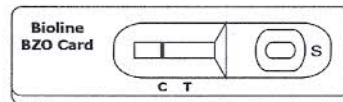

ผลบวก : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณเบนโซไดอะซีปีนส์หรือเมตาบอไลต์มากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

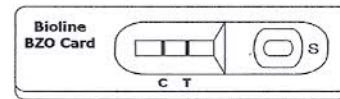

ผลลบ : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณเบนโซไดอะซีปีนส์หรือเมตาบอไลต์น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

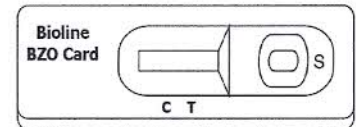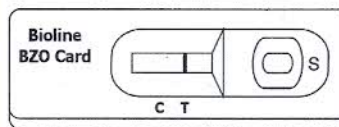

แปลผลไม่ได้ : ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือ เกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบใหม่



หมายเหตุ :

ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

ผลิตโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-5302760 **โทรสาร :** 02-9318340

E-mail : pbsales@brianet.com