


# Bioline Cocaine Card


## คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดโคเคน ในปัสสาวะด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive binding immunoassay)
- สามารถตรวจพบโคเคน และเมตาบอลิไทต์ได้ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 40 ตัวอย่าง


## วิธีการทดสอบ

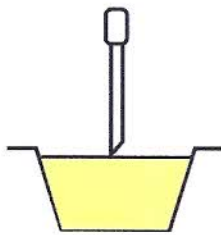

ตัวอย่างปัสสาวะ

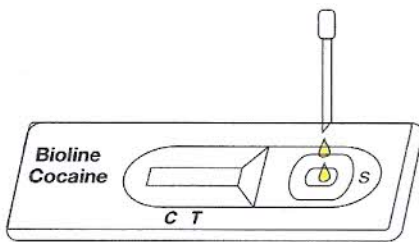


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด  
ลงในหลุม "S"

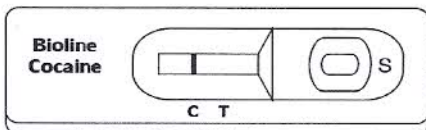


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที



## การแปลผลการทดสอบ

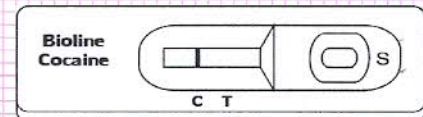

**ผลบวก :** เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น  
หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณโคเคน  
หรือ เมตาบอลิไทต์มากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

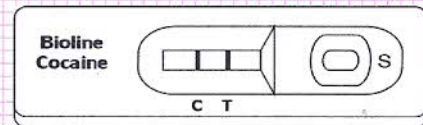

**ผลลบ :** เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T  
หมายถึง ผลการตรวจเป็นลบหรือมีปริมาณโคเคน  
หรือ เมตาบอลิไทต์น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือ ไม่มีเลย

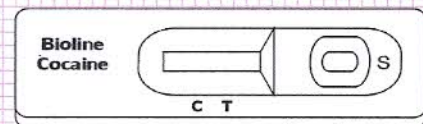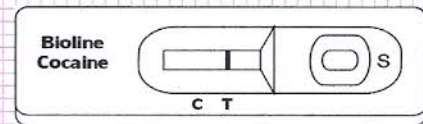

**แปลผลไม่ได้ :** ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือ เกิดแถบ  
สีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุด  
ทดสอบใหม่



**หมายเหตุ :** ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้  
กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็น  
ผลลบได้

**ผลิตโดย :** บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด  
42 หมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

**จัดจำหน่ายโดย :** บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด  
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 02-5302760 โทรสาร : 02-9318340  
E-mail : pbsales@brianet.com