


Bioline Ecstasy (MDMA) Card


ชุดตรวจหาสารเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ในปัสสาวะแบบตลับ

- ❖ เป็นชุดตรวจหาสารเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ในปัสสาวะของมนุษย์ โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay
- ❖ สามารถตรวจหาสารเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- ❖ ชุดทดสอบไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับ Ranitidine, Chlorpheniramine, Aspirin, Paracetamol, Dextromethorphan, Caffeine, Vitamin C
- ❖ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลา 5 นาที (ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการอ่านผล)
- ❖ ชุดตรวจสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ 2 – 30 °C มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันที่ผลิต
- ❖ ขนาดบรรจุ : 40 ชุดทดสอบ/กล่อง
- ❖ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP, ISO9001:2008 และ ISO13485:AC2012


วิธีการทดสอบ

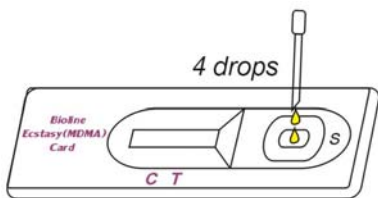


วางตลับทดสอบบริเวณพื้นที่สะอาด ในแนวระนาบ หยดปัสสาวะลงในช่องหยดตัวอย่าง (S) 4 หยด และเริ่มจับเวลาในการอ่านผล 5 นาที

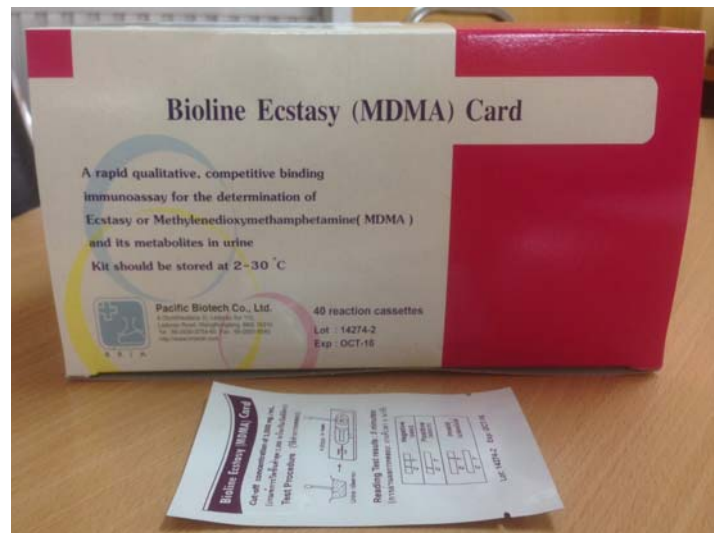


การแปลผลการทดสอบ

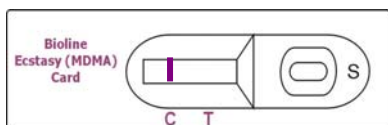


ผลบวก = เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวก หรือมีปริมาณเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

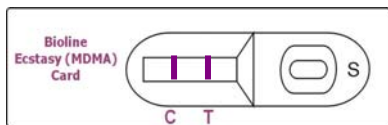

ผลลบ = เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบ หรือมีปริมาณเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน น้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

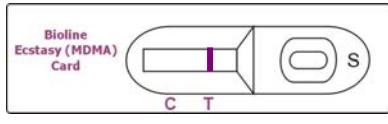

แปลผลการทดสอบไม่ได้ = ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยแถบทดสอบใหม่

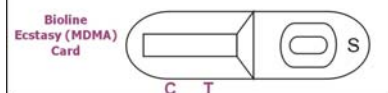

ผลิตโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 056-748650-1

จำหน่ายโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ที่อยู่ 6 ถนนวิวัฒนา 3 ซอยลาดพร้าว 110 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์สายตรง : 02-9351281 โทรสาร: 02-9318340 Email: pbsales@brianet.com

หมายเหตุ: ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบตรวจ แม้ว่าแถบสีจะซีดจางก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้