

ไบโอไลน์ เมทาโดน คาสเซ็ท

คุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบ


เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดเมทาโดน ในปัสสาวะด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ การเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive binding immunoassay)

สามารถตรวจพบเมทาโดน และเมตาบอลไลท์ได้ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป


สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที

ภายในกล่อง 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 40 ตัวอย่าง


วิธีการทดสอบ

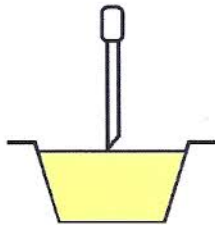

ตัวอย่างปัสสาวะ

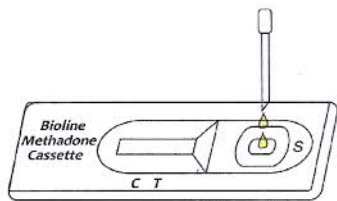


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลง
ในหลุม "S"

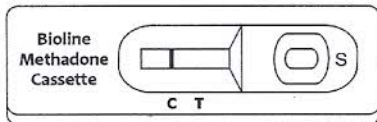


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที



การแปลผลการทดสอบ

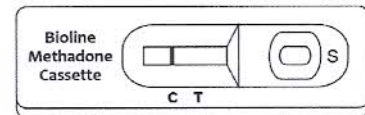

ผลบวก : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณเมทาโดนหรือ เมตาบอลไลท์มากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

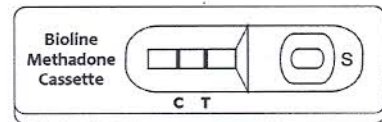

ผลลบ : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณเมทาโดนหรือ เมตาบอลไลท์น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

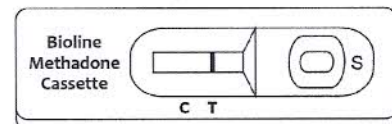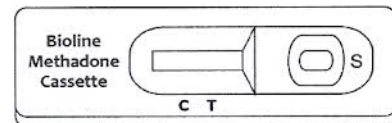

แปลผลไม่ได้ : ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านผลเป็นลบได้

ผลิตโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด 42 หมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด 6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-5302760 โทรสาร : 02-9318340 E-mail : pbsales@brianet.com