

# Bioline Morphine Card

ไบโอไลน์ มอร์ฟิน การ์ด

## คุณลักษณะของชุดทดสอบ


- ⇒ เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟิน ในปัสสาวะด้วยเทคนิค อิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยา การแย่งจับ (Competitive binding immunoassay)
- ⇒ สามารถตรวจพบมอร์ฟิน และเมตาบอลไลท์ได้ตั้งแต่ที่ระดับ ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป
- ⇒ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายใน เวลาเพียง 5 นาที
- ⇒ ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 4 ตัวอย่าง




## วิธีการทดสอบ



ตัวอย่างปัสสาวะ

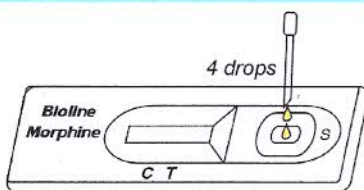


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด  
ลงในหลุม "S"

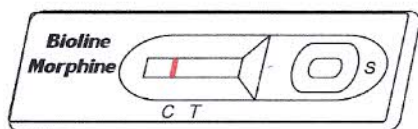


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที



## การแปลผลการทดสอบ

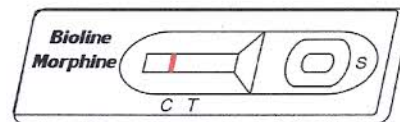

**ผลบวก :** เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น  
หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณ มอร์ฟิน หรือ  
เมตาบอลไลท์มากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

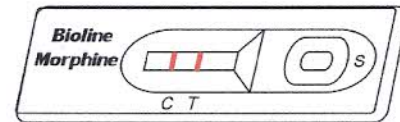

**ผลลบ :** เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T  
หมายถึง ผลการ ตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณ มอร์ฟิน หรือ  
เมตาบอลไลท์น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

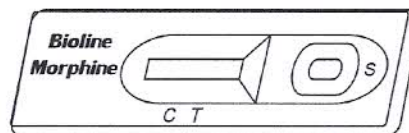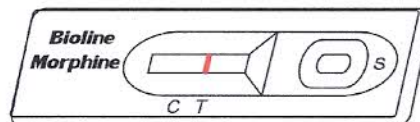

**แปลผลไม่ได้ :**  
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดง  
ที่ตำแหน่ง C หรือ  
เกิดแถบสีม่วงแดง  
เฉพาะที่ตำแหน่ง T  
ดังนั้น ควรทำการ  
ทดสอบด้วยชุด  
ทดสอบใหม่

**หมายเหตุ :** ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

**ผลิตโดย :** บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด  
42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

**จัดจำหน่ายโดย :** บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด  
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 02-5302760 โทรสาร : 02-9318340  
E-mail : pbsales@brianet.com