


Bioline PCP Card

คุณลักษณะของชุดทดสอบ




- ▶ เป็นชุดตรวจหาสารเสพติด **PCP** หรือ **Phencyclidine** ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ การเกิดปฏิกิริยาการแข่งขันจับ (**Competitive binding immunoassay**)
- ▶ สามารถตรวจพบ **PCP** หรือ **Phencyclidine** และเมตาบอลิไทต์ได้ ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 25 นาโนกรัม /มิลลิลิตรขึ้นไป
- ▶ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ▶ ภายในกล่อง 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 40 ตัวอย่าง


วิธีการทดสอบ

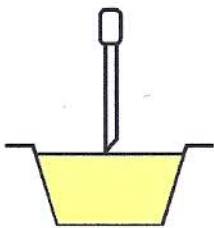

ตัวอย่างปัสสาวะ

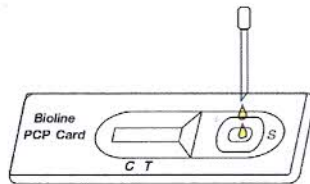


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลงใน หลุม "S"

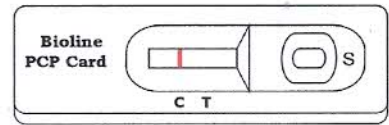


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที



การแปลผลการทดสอบ

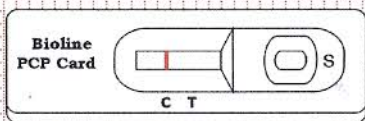

ผลบวก : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณพีซีพี หรือ เมตาบอลิไทต์มากกว่าหรือเท่ากับ 25 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

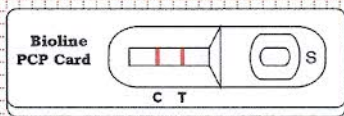

ผลลบ : เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นลบหรือมีปริมาณพีซีพี หรือ เมตาบอลิไทต์น้อยกว่า 25 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

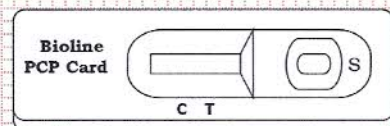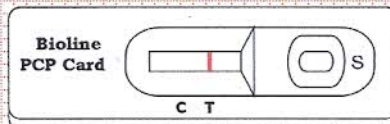

แปลผลไม่ได้ : ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือ เกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยคดียทดสอบใหม่

หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านผลเป็นลบได้

ผลิตโดย :
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จัดจำหน่ายโดย :
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-5302760
โทรสาร : 02-9318340
E-mail : pbsales@brianet.com