


Bioline THC Card ใบโอไลน์ ทีเอชซี การ์ด


คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดตรวจหาสารเสพติดกัญชา ในปัสสาวะด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาการแย่งจับ (Competitive binding immunoassay)
- สามารถตรวจพบกัญชา และเมตาบอไลต์ได้ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้จำนวน 40 ตัวอย่าง


วิธีการทดสอบ

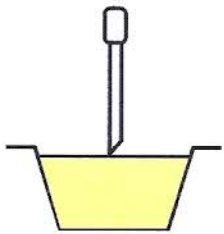

ตัวอย่างปัสสาวะ

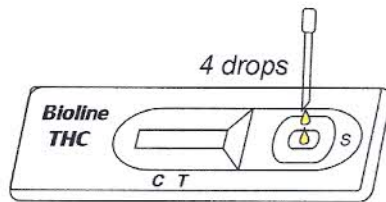


หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลงในหลุม "S"

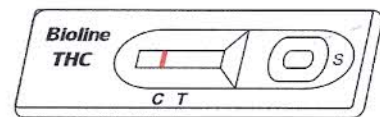

รออ่านผลที่เวลา 5 นาที


แปลผลการทดสอบ

ผลบวก

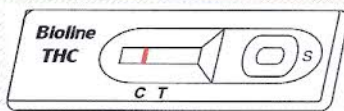



เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณกัญชา หรือ เมตาบอไลต์มากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ผลลบ

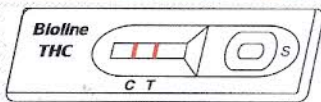

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณ กัญชาหรือเมตาบอไลต์น้อยกว่า 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

แปลผลไม่ได้

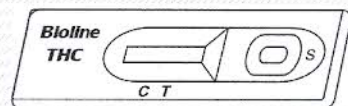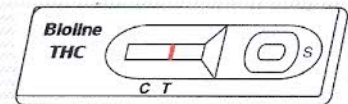

ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือ เกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุดลับทดสอบใหม่



หมายเหตุ : ระดับความเข้มบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้

ผลิตโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-5302760 โทรสาร 02-9318340
E-mail : pbsales@brianet.com