

# ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

## ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด


(ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร)

(ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ จผ.2/2560)


### คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay
- สามารถตรวจพบเมทแอมเฟตามีนได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ชุดทดสอบไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับ Acetaminophen, Aspirin, Brompheniramine, Caffeine, Chlorpheniramine, Dextromethorphan, Vitamin C และ Furosemide ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้ 40 การทดสอบ


### วิธีการทดสอบ

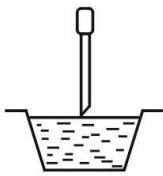

ตัวอย่างปัสสาวะ

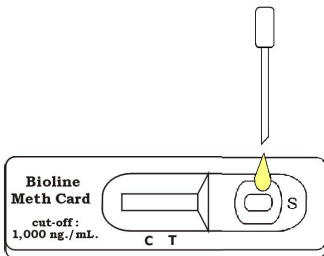

หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลงในหลุม "S"

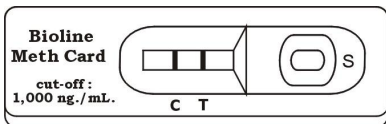


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที




### การแปลผลการทดสอบ

ผลบวก :

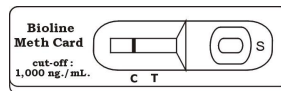



เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวก หรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ผลลบ :

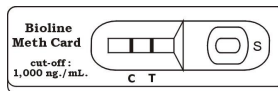

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบ หรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนน้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

แปลผลไม่ได้ :

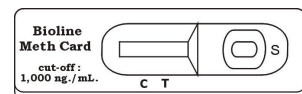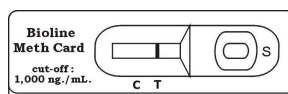

ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบใหม่

ผลิตโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด

42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

จำหน่ายโดย : บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด

6 สนธิวัฒนา 3 ซ.ลาดพร้าว 110 ถ.ลาดพร้าว

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-1066999, 02-9351281 โทรสาร 02-9318340

E-mail: pbsales@brianet.com

หมายเหตุ: ระดับความเข้มบริเวณแถบตรวจ (T) อาจมีการแปรผันได้ กรณีที่ปรากฏแถบตรวจ (T) แม้ว่าแถบสีจะชัดเจนก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้